


Wellion CALLA Light

Vércukormérő-műszer

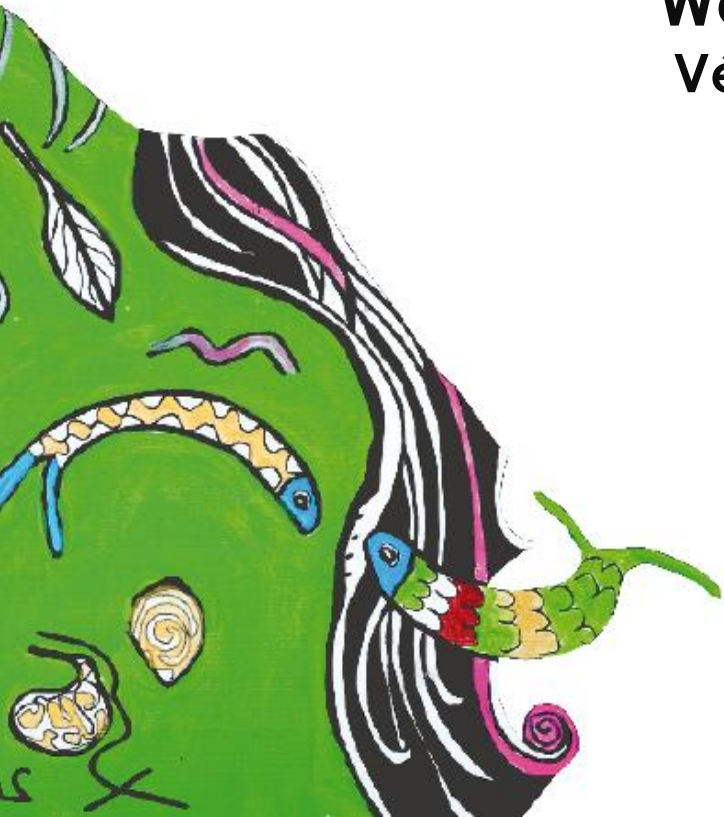

Wellion CALLA Light



- Színt hoz az életébe
- 4 divatos színben
- Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által

Wellion CALLA Light



- Egyszerűen kezelhető
- Zárt egységek
- Dinamikus bioszenzor
- Plazmakalibráció

Wellion CALLA Light



Kódolás nem szükséges



Nagy kontrasztú kijelző az egyszerű leolvashatóságához



1/7/14/30/60 és 90 napos átlagok



3 féle egyéni riasztás



Wellion CALLA Light



Megvilágított kijelző



Étkezés előtti és utáni jelzés



Alacsony és magas vércukorszint riasztás









Ergonomikus kialakítás



A tökéletesség és a design találkozása



Wellion CALLA Light

-  **500 MEM** Automatikusan tárol 500 mérési eredményt dátummal és idővel
-  **6 SEC** 6 másodperc mérési idő
-  **0,6 µl** 0,6 mikroliter vér
-  **1000x** 1000 vizsgálatra elegendő akkumuláció
-  **AAA AAA** 2 db AAA elem
-  **USB** USB csatlakozás



Wellion CALLA Light Vércukormérő

A Wellion CALLA Light mérőeszköz

Ok gomb

- Nyomja meg és tartsa nyomva az OK gombot, (lásd 46. oldal) hogy a mentés vagy a beállítás módba lépjen (lásd 13. oldal),
- Mentés módban a napi átlagértékek eredményeinek megtekintése (lásd 46. oldal),
- Nyomja meg az OK gombot, hogy a beállítás módban található speciális funkciót elérjen (lásd 13. oldal),
- Nyomja meg és tartsa az OK gombot a készülék kikapcsolásához.



Nyílás a tesztsíknak

Helyezzen be egy tesztsíkot (lásd 39. oldal), hogy a készülék bekapcsoljon

PC adapter

Csatlakoztassa az adatkábelt, hogy az eredményeket továbbítani tudja a számítógépre (adatkábel és szoftver külön kapható*)

Az eszköz kijelzője

Mutatja a vércukormérés eredményét, a tárolt értékeket, az átlagokat és egyéb üzeneteket.

Nyílak

Nyomja meg itt, hogy lássa a mért eredményeket és az átlagértékeket (lásd 46. oldal) vagy a készülék beállításain szeretne változtatni (lásd 13. oldal).

* Az adatok helyes leolvasása csak az eredeti Wellion CALLA USB kábel mikro-USB csatlakozással biztosított.

Elemtartó

Két darab AAA elemet tartalmaz.



Wellion CALLA Tesztcsíkok

Tesztcsík vérminta vételi vé
Vigye fel a vért vagy a
kontrolloldatot itt




Kontaktpontok
Helyezze be a készülék
tesztcsík-nyílásába ezt a végét



Wellion CALLA Light – Az eszköz kijelzője

Az eszköz kijelzője

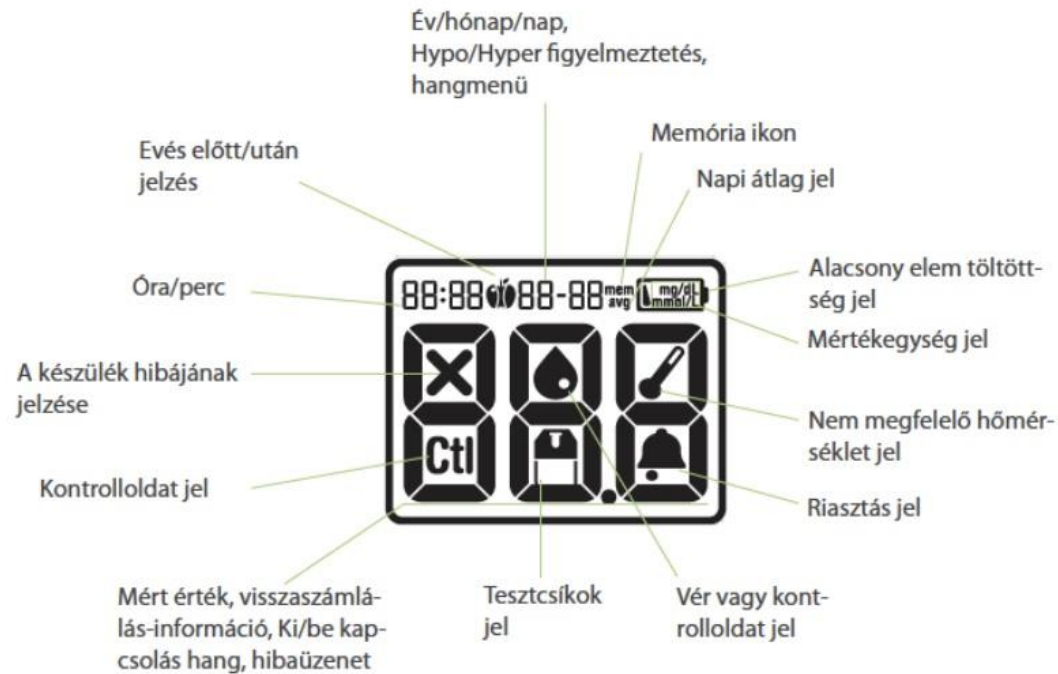

Wellion CALLA Light – az idő és a dátum beállítása

- Nyomja meg és tartsa az OK gombot, amíg a „Func“ felirat meg nem jelenik.
- A dátum és az idő villog
- Nyomja meg ismét az OK gombot, a hónap villog és a nyilak segítségével be tudja állítani a megfelelő hónapot.
- Ugyanígy a napot, évet, percet órát is be lehet állítani.



Wellion CALLA Light – A hangok beállítása

- A dátum beállítása után a ▲ szimbólumok segítségével beállíthatja a hangokat is. A tonE szimbólum villog.
- A mérőeszközt bekapcsolt hangmódban szállítjuk.
- Nyomja meg az OK gombot → OFF elkezd villogni, és a nyilak segítségével kikapcsolhatja a hangokat.



Wellion CALLA Light – A hypo figyelmeztetés beállítása

- Nyomja meg és tartsa az OK gombot 5-6 másodpercig, míg a kijelző tetején a “Func” felirat meg nem jelenik.
- A beállított dátum villog.
- Nyomja meg 2x a ▲ nyilat → “Hypo” villog
- Nyomja meg az OK gombot, a beállított hypo érték elkezd villogni, és a nyilak segítségével be tudja állítani a kívánt értéket.
- A gyári beállítás 3,9 mmol/l




Wellion CALLA Light – A hyper figyelmeztetés beállítása

- Nyomja meg és tartsa az OK gombot 5-6 másodpercig, míg a kijelző tetején a “Func” felirat meg nem jelenik.
- A beállított dátum villog.
- Nyomja meg 3x a ▲ at → “Hyper” villog
- Nyomja meg az OK gombot, a beállított hyper érték elkezd villogni, és a nyilak segítségével be tudja állítani a kívánt értéket.
- A gyári beállítás 13,9 mmol/l




Wellion CALLA Light – A riasztások beállítása

- Nyomja meg és tartsa az OK gombot 5-6 másodpercig, míg a kijelző tetején a “Func” felirat meg nem jelenik.
- A beállított dátum villog.
- Nyomja meg még egyszer a lefelé mutató nyilat, majd az OK gombot, hogy a riasztás beállítási menühöz jusson.
- 3 féle egyéni riasztást állíthat be
- Gyárilag az összes riasztás ki van kapcsolva.

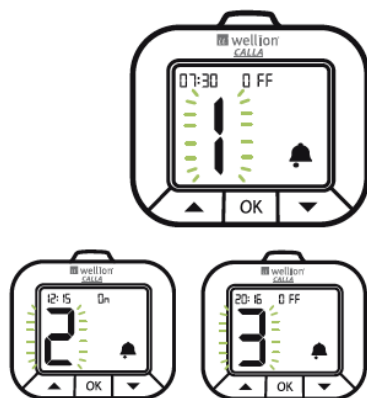




A vércukor mérése

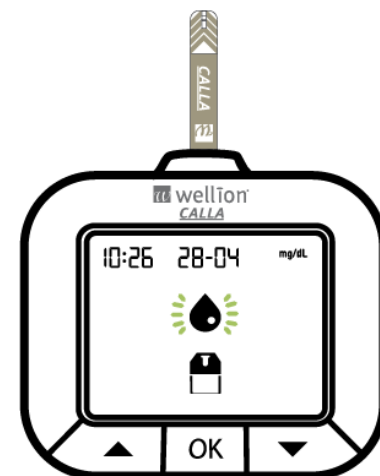- Helyezzen be egy tesztcsíkot a Wellion Calla Light vércukor mérő készülékbe.
- Várjon, míg a kijelzőn egy villogó vércsepp és egy tesztcsík szimbólum meg nem jelenik.
- Merítse a tesztcsík hegyét kis szögben a vércseppbe.
- Ha elég vér áll rendelkezésre, akkor a készülék pittyenő hangot ad ki.
- A visszaszámlálás automatikusan indul (6 másodperc mérési idő)
- Az eredmény megjelenik a kijelzőn
- A tesztcsík eltávolítása után az eredményt dátummal és idővel eltárolja.



Étkezés előtti és utáni jelzés beállítása

- Miután a sikeres vércukormérés eredménye megjelent a kijelzőn, az étkezésjelző villogni kezd.
- Válassza ki a nyilak segítségével az “Étkezés előtt”  szimbólumot, vagy a  “ szombólumot „Étkezés után”
- A mérési eredményt a dátummal, idővel és az étkezés előtt vagy után jelzéssel tárolja a készülék.

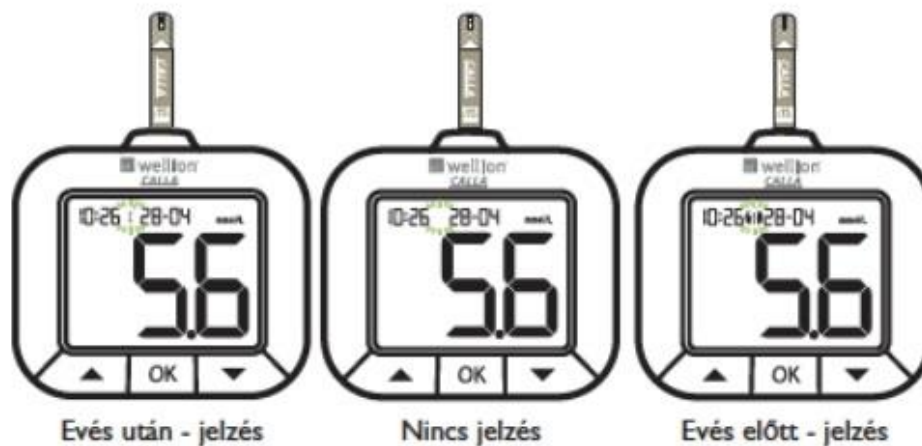

Próba kontrolloldattal

- Vezessen be egy tesztcsíkot a készülékbe
- Várjon, míg a kijelzőn egy villogó vércsepp és egy tesztcsík szimbólum meg nem jelenik.
- Merítse a tesztcsík végét a kontrolloldatba (Level 0, 1 vagy 2)
- A visszaszámlálás automatikusan elindul (6 másodperc)
- Az eredményt dátummal és idővel, valamint a „ctl” jelzéssel tárolja a készülék.



A mérési eredmények értelmezése

- Tartsa nyomva az OK gombot 3 másodpercig, míg a kijelzőn a “mem” felirat meg nem jelenik.
- A legutóbbi mérés eredményét láthatja
- A nyíl ▲ segítségével megnézheti a tárolt mérési értékeket.




A napi átlagok megtekintése

- Tartsa nyomva az OK gombot 3 másodpercig, míg a „mem” felirat meg nem jelenik.
- A legutoljára mért értéket mutatja
- Nyomja meg ismét az OK gombot, hogy a napi átlagértékeket láthassa



Wellion CALLA Light – Kezelés és karbantartás

- Cserélje ki az elemeket, ha a  szimbólum megjelenik a kijelzőn
- Tárolja készülékét az eredeti tartójában
- Óvja készülékét a napfénytől és a forróságtól
- Vigye a készüléket megfelelő hőmérsékletű helyiségbe (10-40°), és várjon míg a környezeti hőmérsékletet eléri
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe
- Tisztítsa készülékét nedves törlőruhával (NEM VIZES) vagy 70% -os Isopropylalcohol-lal.



Wellion CALLA Light – Kezelés és karbantartás

- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a tesztcsíkra, illetve a nyílásra, ahova a tesztcsíkot helyezi be.
- Kerülje el a mérőeszköz és a tesztcsíkok magas páratartalmú helyen való tárolását és használatát, pl fürdőszoba vagy konyha.
- Minden alkalommal, mikor kivesz egy tesztcsíkot a dobozából, győződjön meg róla, hogy rendesen lezárta a doboz fedelét.
- Ne szerelje szét a műszert egyedi alkatrészeire, mert az a garancia elvesztésével jár.



Wellion CALLA Light – Hibajelzések

- E 1 Gond a tesztcsíkkal (sérült, nedves vagy már használt)– ismételje meg a mérést egy új tesztcsíkkal
- E 2 túl kevés vér – ismételje meg a mérést új tesztcsíkkal
- E 3Túl hamar eltávolításra került a tesztcsík – ismételje meg a mérést új tesztcsíkkal
- E 4 szélsőséges körülmények– ismételje meg a mérést új tesztcsíkkal



Wellion CALLA Light – Fehlermeldungen

- E 5 A készülék sérült – forduljon a készülék forgalmazójához
- Akkumulátor gyenge – cserélje ki az elemeket
- A mérés mérési hőmérsékleten kívül történt – Vigye a készüléket 10° C és 40° C közötti hőmérsékletű helyiségbe és várjon 10-15 percet míg a környezeti hőmérsékletet eléri.
- HI A mérési eredmény magasabb mint 33.3 mmol/l – Mossa, majd törölje meg kezeit és ismételje meg a mérést egy új tesztcsíkkal. Ha az eredmény ismét HI, forduljon azonnal orvosához és egészségügyi szakemberhez.
- LO A mérési eredmény alacsonyabb, mint 1.11 mmol/l – Mossa, majd törölje meg kezeit és ismételje meg a mérést egy új tesztcsíkkal. Ha az eredmény még mindig LO, forduljon azonnal orvosához és egészségügyi szakemberhez





Arra törekszünk, hogy partnereink és a páciensek életét megkönnyítsük.

Innovatív ötletekkel, tanácsadással és szervízzel